

COGABE

Comercial Ganadera Benítez

MASTIMILK



Mejora la salud del Rebaño

MASTIMILK

DETECTOR ELECTRÓNICO DE MASTITIS EN CALOSTRO Y LECHE DE ORDEÑO.

LECTURA INSTANTÁNEA Y OBJETIVA. APTO PARA TODO MAMÍFERO.

Detecte el estado de la ubre en el mismo momento del parto analizando directamente el calostro.

Evite secar animales con mastitis.

Permite diferenciar si un aumento de RCS es debido a una mastitis o a otra causa (v.g. alimentaria)

LECTURA OBJETIVA.

LECTURA INDIVIDUAL POR CUARTERÓN.

DETECTA MASTITIS 24 HORAS ANTES DE SU APARICIÓN

LECTURA BASADA EN CONDUCTIVIDAD, DENSIDAD Y TEMPERATURA DE ORDEÑO.

NO UTILIZAR PARA LECTURA EN LECHE DE TANQUE.

MODO DE EMPLEO:

- 1.- Encender **MASTIMILK** manteniendo presionado el botón ON/OFF.
- 2.- Despuntar.
- 3.- Ordeñar directamente del cuarterón al vaso receptor de **MASTIMILK**.
- 4.- Lectura instantánea (datos de referencia de RCS aceptados para vacuno).

-  **SANIDAD DE UBRE ÓPTIMA - LECHE PERFECTA**
-  **UBRE INFLAMADA - LECHE APTA PARA CONSUMO**
-  **MASTITIS SUBCLÍNICA - LECHE ALTA EN CLS SOMÁTICAS**
-  **MASTITIS CLÍNICA - LECHE NO APTA PARA EL CONSUMO**
-  **MASTITIS GRAVE - LECHE NO APTA PARA EL CONSUMO**
-  **ERROR DE LECTURA**

- 5.- Vaciar el vaso receptor, y proceder al siguiente cuarterón.
- 6.- Al final de las lecturas deseadas, desactivar con el botón ON/OFF.
- 7.- Limpiar con agua y secar muy bien con paño de celulosa.
Guardar en la caja correspondiente.

COGABE
Comercial Ganadera Benítez



cogabe2017@gmail.com • 669 39 62 74 • 669 39 62 79